

Aspirator do nosa NOVAMA Pingo Spark Aspirator Blue z oświetleniem



cena: 99,99 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	nos
Działanie	oczyszczające
Opakowanie	1 szt.
Postać	aspirator
Producent	NOVAMED.PL S.A.
Sposób aplikacji	do nosa
Typ produktu	Sprzęt medyczny
Wskazania	katar

Opis produktu

Aspirator do nosa Pingo Spark z podświetlaną końcówką, która świetnie sprawdza się w nocy. To łatwy w użyciu odciągacz kataru, który pomaga najmłodszemu szybko wrócić do zdrowia.

Zalecany jest od pierwszych dni życia dziecka, aż do osiągnięcia wieku szkolnego. Aspirator dla dzieci Novama Pingo Spark charakteryzuje się nowoczesną konstrukcją i zwiększoną efektywnością. Posiada system antyprzelewowy zapobiegający przedostawaniu się wydzieliny do wnętrza urządzenia.

Poręczny aspirator Novama Pingo Spark, nie wymaga zasilania prądem, działa na baterie. Lekki i cichy, nadaje się do stosowania w nocy, nawet gdy dziecko śpi.

Podświetlana końcówka ułatwia odciąganie wydzieliny z nosa. Nie wymaga kupowania materiałów eksploatacyjnych takich jak jednorazowe zbiorniczki, kapturki, pojemniczki.

Ten aspirator jest urządzeniem medycznym, bezpiecznym, wykonanym zgodnie z dyrektywą CE EC/93/42/EEC MDD a do produkcji zastosowano atestowane, bio-kompatybilne materiały.

Przenośny aspirator do nosa Novama Pingo Spark to:

- Efektywna moc ssania - ciśnienie próżniowe (moc ssania): ≤ 450 mmHg (60 kpa);
- Podświetlenie LED;
- 2 rozmiary końcówek z miękkiego, przyjemnego w dotyku silikonu;
- 3 lata gwarancji;
- Dostępny w 3 kolorach: pastel pink, lime green, blue;
- System antyprzelewowy.

Sposób użycia:

Rozrzedź wydzielinę w nosie aplikując roztwór soli fizjologicznej lub wody wydzielinę w nosie aplikując roztwór soli fizjologicznej lub wody morskiej do nosa dziecka.

Zamocuj wybraną końcówkę do aspiratora. Końcówka powinna idealnie pasować do obudowy urządzenia.

Końcówka z szerszym otworem, rekomendowana jest w sytuacji, gdy wydzielina jest bardziej zwarta. Końcówka z węższym otworem rekomendowana jest w przypadku bardziej płynnej wydzieliny.
Naciśnij przycisk POWER w celu aktywacji funkcji ssania.
Przed umieszczeniem końcówki w nozdrzu upewnij się, że urządzenie prawidłowo działa.
Dziecko powinno być w pozycji pionowej - stojącej lub siedzącej. Odsysanie wydzieliny powinno zająć kilka sekund.
Powtórz opisane czynności w drugim nozdrzu.

Warto także dbać o prawidłowe nawilżenie powietrza w pokoju dziecka (np. za pomocą nawilżaczy powietrza) oraz stosować maści nawilżające na skórę okolicy nosa, aby zapobiec jej podrażnieniu.
Adres producenta/dystrybutora

ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź