

COMPEED Plastry na halluksy 5 sztuk



cena: 20,53 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	stopy
Działanie	nawilżające, przeciwbólowe, wspomagające
Opakowanie	5 sztuk
Postać	plaster
Producent	JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	na skórę
Wskazania	ból, halluksy, otarcia, pęcherz, podrażnienie, zwyrodnienie

Opis produktu

Opis:

Technologia hydrokoloidu COMPEED® to aktywny żel wspomagający nawilżanie. Plastry COMPEED® działają jak druga skóra, aby:

uśmierzać natychmiastowo ból i ucisk,
chronić halluksy przed kolejnymi otarciami,
zapobiegać pęcherzom oraz twardnieniu skóry.
Pozostają na miejscu przez kilka dni.

W indywidualnych przypadkach czas ten może się różnić.

Sposób użycia:

Umyj oraz osusz skórę przed zastosowaniem. Upewnij się, czy skóra dotknięta halluksem nie jest tłusta od kremu czy oliwki. Usuń jedną papierową warstwę, następnie drugą, starając się unikać dotykania warstwy samoprzylepnej. Nałóż plaster mocno na halluks, upewniając się, czy brzegi plastra są dobrze dociśnięte do skóry. Pozostaw plaster na halluksie aż do momentu, kiedy sam zacznie się odklejać. Może pozostawać na miejscu nawet do kilku dni. Zmieniaj plaster COMPEED® na nowy tak często, jak jest to potrzebne.

Dodatkowe informacje:

Osoby chore na cukrzycę przed użyciem powinny zasięgnąć porady lekarza.
Nie stosuj na zainfekowane rany.
Nie wolno stosować ponownie tego samego plastra (mogłoby to spowodować infekcję).
Nigdy nie przecinaj plastrów COMPEED®.
W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej natychmiast skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu.