

## COMPEED Plastry na odciski, średnie 10 sztuk



cena: 21,91 pln

### Opis słownikowy

Cześć ciała	stopy
Działanie	łagodzące, nawilżające, ochronne, przeciwbólowe, zmiękczające
Opakowanie	10 sztuk
Postać	plaster
Producent	JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	na skórę
Wskazania	ból, odciski, otarcia

### Opis produktu

#### Opis:

Technologia hydrokoloidu COMPEED® to aktywny żel wspomagający nawilżanie. Plastry COMPEED® działają jak druga skóra, pomagają utrzymać naturalne nawilżenie skóry, aby:

chronić przed otarciami i uciskiem;  
przynosić natychmiastową ulgę w bólu i ucisku spowodowanym przez odciski;  
nawilżać i zmiękczać odcisk, pomagając go usunąć.  
Pozostają na miejscu przez 24 godziny.

W indywidualnych przypadkach czas ten może się różnić.

#### Sposób użycia:

Umyj oraz osusz skórę przed zastosowaniem. Upewnij się, czy skóra dotknięta odciskiem nie jest tłusta od kremu czy oliwki. Usuń warstwę papierową, starając się unikać dotykania warstwy samoprzylepnej. Nałóż plaster mocno na odcisk, upewniając się, czy brzegi plastra są dobrze dociśnięte do skóry. Pozostaw plaster na odcisku aż do momentu, kiedy sam zacznie się odklejać. Może pozostawać na miejscu nawet do kilku dni. W celu uzyskania lepszych rezultatów używaj COMPEED® aż do czasu, gdy skóra będzie całkowicie wyleczona.

#### Dodatkowe informacje:

Osoby chore na cukrzycę przed użyciem powinny zasięgnąć porady lekarza.  
Nie stosuj na zainfekowane rany.  
Nie wolno stosować ponownie tego samego plastra (mogłoby to spowodować infekcję).  
Nigdy nie przecinaj plastrów COMPEED®.  
W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej natychmiast skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu.