

COREGA Original extra silny XI 70g



cena: 23,93 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	dziąsła, jama ustna
Opakowanie	70 g
Postać	krem
Producent	PPHU MINI-MAXI IRENA WYDRA
Sposób aplikacji	w jamie ustnej
Typ produktu	Wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.

Opis produktu

Bardzo mocny Krem mocujący do protez zębowych o delikatnym miętowym smaku.

Skład:

calcium-sodium PVM/MA copolymer, petrolatum, cellulose gum, paraffinum liquidum, propylparaben, aroma, CI 45430

Działanie:

Krem mocujący Corega gwarantuje mocne utrzymanie protezy zębowej przez cały dzień. Nie posiada w składzie cynku. Krem Corega uszczelnia protezę a także zapobiega przedostawaniu się resztek pokarmu pod jej powierzchnię, nawet jeśli jest dobrze wykonana i dopasowana. Tuba z kremem posiada precyzyjną końcówkę, ułatwiającą aplikację kremu. Corega dodaje pewności siebie przez cały dzień.

*Sposób użycia:

Umyj i dokładnie osusz protezę. Aby uzyskać jak najlepszy efekt czyszczenia zaleca się używanie tabletek Corega Tabs.

Nanieś kilka krótkich pasków (6 mm) kremu na protezę, niezbyt blisko jej krawędzi.

Wyplucz jamę ustną przed założeniem protezy.

Załóż protezę, dociśnij ją , następnie na kilka sekund przygrzyź.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego:

* Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE.

* Posiada deklarację zgodności UE

* Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim

* Zawiera etykietę w języku polskim

Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.