

# COREGA Super Mocny delikatnie miętowy 70 g

cena: 23,34 pln



## Opis słownikowy

Cześć ciała	dziąsła, jama ustna
Opakowanie	70 g
Postać	krem
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	w jamie ustnej
Typ produktu	Wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.

## Opis produktu

### Opis:

Specjalna formuła kremu Corega Super Mocny Delikatnie Miętowy zapewnia trwałe mocowanie protezy przez cały dzień bez ryzyka podrażnienia wrażliwych dziąseł.

Zapewnia trwałość mocowania protezy przez cały dzień

Posiada przyjemny delikatnie miętowy smak Nawet w przypadku najlepiej dopasowanych protez zębowych istnieje ryzyko przedostawania się pod ich powierzchnię niewielkich drobinek jedzenia, które powodują uczucie dyskomfortu. Krem Corega Super Mocny Delikatnie Miętowy o udowodnionym działaniu uszczelniającym zapobiega zaleganiu pokarmów pod protezą zębową.

### Sposób użycia:

Aplikowanie:

Umyj i wysusz protezę.

Nanieś kilka krótkich pasków kremu Corega na protezę, niezbyt blisko jej krawędzi (jak pokazano na opakowaniu).

Wyłucz jamę ustną przed włożeniem protezy do ust.

Włóż protezę, dociśnij ją mocno i na kilka sekund przygrzyź.

Użyj małej ilości kremu, jeśli stosujesz go po raz pierwszy. Ustalenie, jaka ilość kremu będzie odpowiednia może wymagać kilku prób.

Odczekaj kilka minut zanim będziesz jeść lub pić. Zawsze przestrzegaj instrukcji stosowania podanych na opakowaniu.

### Zdejmowanie:

Przed wyjęciem protezy zębowej przepłucz usta ciepłą wodą.

Wymij protezę powoli, delikatnie nią poruszając.

Żeby usunąć z protezy zębowej resztki kremu, zanurz ją w roztworze tabletek czyszczących Corega według instrukcji stosowania i usuń pozostałości kremu szczoteczką.

Aby usunąć krem mocujący z jamy ustnej, szczotkuj podniebienie i dziąsła szczoteczką i ciepłą wodą.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego:



Forvital Sp. z o.o. Sp. K.  
ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 3, Kościan  
+48 722 101 968

- \* Wyrob medyczny - posiada oznakowanie CE.
- \* Posiada deklarację zgodności UE
- \* Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- \* Zawiera etykietę w języku polskim

Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.