

Disnemar baby dla niemowląt i dzieci aerozol 25 ml



cena: 24,83 pln

Opis słownikowy

| | |
|------------------|---|
| Cześć ciała | nos |
| Działanie | nawilżające, oczyszczające |
| Opakowanie | 25 ml (250 daw.) |
| Postać | aerozol |
| Producent | MYLAN EPD |
| Sposób aplikacji | do nosa |
| Typ produktu | Wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą. |
| Wskazania | alergia, infekcja, katar, suchość |

Opis produktu

Opis:

Disnemar baby, fizjologiczny roztwór donosowy to wyrób medyczny. Może być stosowany u dzieci i niemowląt już od 1. dnia życia. To izotoniczny roztwór soli mineralnych o neutralnym pH do stosowania w obrębie jamy nosowej. Nie podrażnia błony śluzowej nosa, a specjalnie zaprojektowany dozownik umożliwia aplikację produktu nawet w pozycji leżącej. Przezroczysta butelka umożliwia stałą kontrolę ilości roztworu.

Skład:

woda oczyszczona o neutralnym pH, elektrolity - tzn. jony sodu, potasu, chloru, wodorowęglany, środek konserwujący - chlorek benzalkonium, który zapobiega zakażeniu roztworu przez bakterie.

Działanie:

Nawilża błonę śluzową nosa, co wspomaga jej regenerację. Łagodzi objawy niedrożności nosa.

Wskazania:

Disnemar baby jest stosowany u dzieci i niemowląt już od 1. dnia życia do codziennej higieny nosa, nawilżania wysuszonej błony śluzowej nosa spowodowanej różnymi przyczynami np. działaniem klimatyzacji, centralnego ogrzewania, dymem papierosowym, kurzem, nawracającymi infekcjami błony śluzowej, podeszłym wiekiem, udrażniania nosa przy niedrożności nosa spowodowanej: przeziębieniem, nieżytem nosa, ostrym zapaleniem zatok czy zanieczyszczonym powietrzem.

Sposób użycia:

Dzieci i niemowlęta: jedna dawka do każdego otworu nosowego kilka razy na dobę. U niemowląt zaleca się stosowanie przed posiłkiem lub karmieniem, ponieważ udrożnienie nosa umożliwia połykanie pokarmu bez powietrza, dzięki czemu unika się dolegliwości ze strony układu pokarmowego, związanych z połykaniem powietrza.



Produkt można stosować codziennie, kilka razy w ciągu dnia - przez dowolnie długi czas.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego:

* Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE.

* Posiada deklarację zgodności UE

* Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim

* Zawiera etykietę w języku polskim

Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.