

HIALEYE DUO Emulsja krople 10 ml

cena: 34,51 pln



Opis słownikowy

Cześć ciała	oczy
Działanie	nawilżające, ochronne, regenerujące
Opakowanie	10 ml
Postać	krople
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Sposób aplikacji	do oczu
Typ produktu	Wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.
Wskazania	suchość, zaczerwienienie

Opis produktu

Opis:

Krople do oczu w postaci lipidowej mikroemulsji, przeznaczone do zapobiegania i leczenia umiarkowanej i silnej suchości oka.

Krople do oczu zmniejszają zaczerwienienie oczu, poprawiają widzenie nawet w trudnych warunkach i zapewniają długotrwałą skuteczność. Większość pacjentów z silną suchością oka powinna odczuć istotną poprawę komfortu oczu po upływie 10 do 30 dni; efekt ten, udowodniony w badaniu klinicznym, można uzyskać przy częstym stosowaniu kropli do oczu według podanych niżej zaleceń. Nastąpi również poprawa widzenia w trudnych warunkach.

Skład:

0,1% olej z nasion sacha inchi (*Plukenetia volubilis*), 2% trehaloza, 0,2% hialuronian o wysokiej masie cząsteczkowej i glicerol w jałowej i hipotonicznej emulsji trometamolu/buforu cytrynianowego. Nie zawiera środków konserwujących, alkoholu, fosforanów, boranów, oleju mineralnego ani materiałów pochodzenia zwierzęcego.

Sposób użycia:

Podawać po 1 kropli do każdego oka, 3–4 razy dziennie. Strząsnąć pozostałą kroplę z końcówki i zamknąć butelkę nakrętką. Dzięki niewielkiej podkładce wewnątrz nakrętki kolejna pobierana kropla będzie świeża i czysta. W miarę ubywania zawartości butelki zaleca się chwytanie dozownika w środkowej części i nieco mocniejsze ściskanie.

Zawartość należy zużyć w ciągu sześciu (6) miesięcy od otwarcia i przed upływem daty ważności.

Odczekać co najmniej 15 minut po podaniu i przed podaniem innych leków do oczu.

Po zastosowaniu nie należy zakładać zakrętki, dopóki butelka nie nabierze oryginalnego okrągłego kształtu (w butelce przepływa powietrze zastępcze).

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego:

- * Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE.
- * Posiada deklarację zgodności UE
- * Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- * Zawiera etykietę w języku polskim

Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.