

## Iladian Żel intima 30 g



cena: 15,58 pln

### Opis słownikowy

Cześć ciała	okolice intymne
Działanie	wspomagające
Opakowanie	30 g
Postać	żel
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	na skórę
Typ produktu	Wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.
Wskazania	pieczenie, podrażnienie, suchość

### Opis produktu

#### Opis:

Iladian intima zapewnia odpowiednie pH ograniczające rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych, redukuje nieprzyjemny zapach, świąd i pieczenie, znosi dyskomfort związany z podrażnieniem lub suchością zewnętrznych narządów płciowych.

Objawy te mogą mieć podłoże chorobowe, ale mogą być również spowodowane takimi czynnikami, jak:

- nieodpowiedni żel do mycia
- uczulenie na środek do prania sztuczna,
- zbyt obcisła bielizna
- otarcia spowodowane współżyciem lub uprawianiem sportu

Żel iladian intima o lekko kwaśnym odczynie pH (ok. 4,0):

przywraca prawidłowe warunki fizjologiczne, przez co redukuje poczucie dyskomfortu i hamuje rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych,

Ze względu na swoje właściwości nawilżające i poślizgowe chroni przed otarciami, które często prowadzą do rozwoju infekcji zewnętrznych miejsc intymnych.

ILADIAN INTIMA przeznaczony jest dla kobiet, które odczuwają dyskomfort (pieczenie, swędzenie, suchość) w okolicach zewnętrznych narządów płciowych oraz dla tych, które są wyjątkowo narażone na infekcje okolic intymnych.

#### Stosowanie:

pomocniczo w leczeniu infekcji stref intymnych  
dla odtworzenia właściwego odczynu pH okolic intymnych  
w celu ograniczenia rozwoju drożdżaków w trakcie lub po kuracji antybiotykowej



w uczucie suchoty i napięcia zewnętrznych narządów płciowych  
w okresach częstego korzystania z basenu, sauny, solarium, jacuzzi itp.

**Sposób użycia:**

Iladian intima przeznaczony jest tylko do użytku zewnętrznego.

Po umyciu na okolice zewnętrznych narządów płciowych nałożyć cienką warstwę żelu iladian intima.

Żel należy nakładać od przodu w kierunku odbytu. Stosować raz dziennie, na noc.

W przypadku utrzymywania się objawów powyżej 7 dni należy zasięgnąć porady lekarza.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego:

\* Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE.

\* Posiada deklarację zgodności UE

\* Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim

\* Zawiera etykietę w języku polskim

Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.