

## Lacrimonatura Plus krople do oczu 10 ml

cena: 28,39 pln



### Opis słownikowy

|                  |   |
|------------------|---|
| Cześć ciała      | oczy  |
| Działanie        | łagodzące, nawilżające, ochronne                                    |
| Opakowanie       | 10 ml   |
| Postać           | krople  |
| Producent        | ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.                               |
| Sposób aplikacji | do oczu   |
| Typ produktu     | Wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą. |
| Wskazania        | podrażnienie, suchość, zaczerwienienie, zmęczenie                   |

### Opis produktu

#### Opis:

Lacrimonatura® Natura Plus to sterylny roztwór do oczu o fizjologicznym pH, dostępny w wielodawkowej butelce o pojemności 10 ml. Głównym działaniem wyrobu jest nawilżanie powierzchni oka, dzięki zawartości hialuronianu sodu i hypromelozy. Lacrimonatura® Natura Plus jest wskazany do stosowania w celu łagodzenia zaczerwienienia, zmęczenia, dyskomfortu i suchości oczu. Lacrimonatura® Natura Plus działa jako środek nawilżający na powierzchni oka, łagodząc zaczerwienienie, zmęczenie oraz dyskomfort oczu i śluzówki oczu spowodowane czynnikami środowiskowymi (wiatr, dym, zanieczyszczenia, długotrwała ekspozycja na słońce, sól i wodę morską) i długotrwałym korzystaniem z komputera. Przeciwdziała on także objawom zespołu suchego oka. Hialuronian sodu jest stosowany ze względu na swe właściwości nawilżające które zapobiegają suchości oczu. Tworzy on powłokę chroniącą nabłonek rogówki przed wpływem czynników zewnętrznych. Hypromeloza to polimer o właściwościach mukomimetycznych, który stabilizuje film łzowy na powierzchni rogówki poprzez tworzenie przezroczystej i lepkością elastycznej warstwy ochronnej. Hialuronian sodu to molekula występująca naturalnie w tkankach organizmu wymagających stałego nawilżenia (np. chrząstka, skóra, film łzowy), jest on zatem substancją biogodną. W połączeniu z hypromelozą zapewnia on intensywne i długotrwałe nawilżenie powierzchni oka. Oba te składniki przyciągają i wiążą wodę z otoczenia oraz tworzą nawilżającą warstwę na powierzchni oka. Ponieważ ta lepka osłona uwalnia wodę stopniowo, Lacrimonatura® Natura Plus zapewnia długotrwałe nawilżenie oczu. Ponadto Lacrimonatura® Natura Plus zawiera chlorek sodu i bufor boranowy gwarantujące fizjologiczne właściwości roztworu oraz wyciągi wodne z rumianku, aloesu, róży i borówek, które zapewniają działanie nawilżające. Lacrimonatura® Natura Plus nie zawiera konserwantów ani buforów fosforanowych.

Lacrimonatura® Natura Plus może być stosowany z soczewkami kontaktowymi. Lacrimonatura® Natura Plus łagodzi również stres wywołany stosowaniem soczewek kontaktowych i zabiegami chirurgicznymi w obrębie powierzchni oka.

#### Skład:

hialuronian sodu 0,2%, hypromeloza 0,2%, wyciąg wodny z aloesu, wyciąg wodny z rumianku, wyciąg wodny z borówki, wyciąg wodny z

dziki, różowy, kwas borny, dekahydrat tetraboranu disodowego, chlorek sodu, woda do iniekcji.

#### Sposób użycia:

Przed użyciem dokładnie umyć i osuszyć ręce;

Przed pierwszym użyciem zerwać plombę zabezpieczającą;

Zdjąć zakrętkę ochronną;

Ścisnąć butelkę i zakropić 2-3 krople do każdego oka; nie należy stosować więcej niż 10 dawek (2-3 krople na oko) na dobę;

Po podaniu każdej kropli należy odczekać kilka sekund bez ściskania butelki, co pozwoli na zaciągnięcie z powrotem odpowiedniej ilości powietrza przez jałowy system filtrujący, w przeciwnym razie trudniejsze jest wyciskanie kropli;

Im mniej produktu pozostaje w butelce, tym silniej należy ją ścisnąć w celu aplikacji odpowiedniej ilości produktu. Jest to związane z właściwościami systemu zamknięcia, który ma zachowywać jałowość oraz chemiczne i fizyczne właściwości roztworów niezawierających konserwantów. W butelce zawsze pozostaje niewielka ilość roztworu;

Jeśli kropla nie trafi do oka próbę zakroplenia należy powtórzyć;

W razie potrzeby powtórzyć proces dla drugiego oka;

Po użyciu strząsnąć pozostałą kroplę z końcówki zakraplacza;

Natychmiast po użyciu należy zamknąć butelkę za pomocą zakrętki;

Nie nakładać zakrętki, dopóki butelka jest ściśnięta;

Nie dotykać niczego końcówką zakraplacza, w tym ani oczu, ani palców;

Produkt może być używany przez maksymalnie 3 miesiące od pierwszego otwarcia;

Lacrimonat® Natura Plus można stosować z soczewkami kontaktowymi.

#### OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Produkt zawiera następujące substancje stwarzające zagrożenie sklasyfikowane jako substancje CMR w stężeniach powyżej 0,1% w/w.: kwas borny i tetraboran sodu dziesięciowodny. Wyrób nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży ani karmiących piersią;

Po zastosowaniu wyrobu widzenie może być tymczasowo niewyraźne. Może również wystąpić przemijające, niewielkie

pieczenie/kłucie/podrażnienie wskutek podrażnienia oka. Jeśli objawy te nie ustępują lub ulegają nasileniu, należy zgłosić się do lekarza;

Wyrób przeznaczony do użycia tylko do oczu;

Wyrób powinien być stosowany przez jedną osobę;

Nie używać wyrobu, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub nie jest prawidłowo zamknięte przy pierwszym otwarciu;

Nie stosować, jeśli widoczne są cząstki i/lub zmiany koloru roztworu;

Podczas aplikacji nie dotykać końcówką zakraplacza ani oka, ani żadnej innej powierzchni;

Nie stosować wyrobu po terminie ważności podanym na opakowaniu;

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych podczas stosowania wyrobu, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem;

Nie stosować w przypadku nietolerancji na jakikolwiek składnik produktu i/lub w przypadku uczulenia na rośliny z rodziny Asteraceae i/lub Liliaceae, i/lub Ericaceae, i/lub Rosaceae;

Nie są znane interakcje z lekami lub innymi kroplami do oczu, jednakże należy zachować 15-minutowy odstęp pomiędzy podaniem innych kropli do oczu;

Wyrób należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami;

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci;

Do użytku zewnętrznego, nie połykać;

Nie należy próbować manipulować zakraplaczem butelki ani demontować go;

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego:

\* Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE.

\* Posiada deklarację zgodności UE

\* Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim

\* Zawiera etykietę w języku polskim

Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.