


Microdacyn 60 Wound Care 500ml

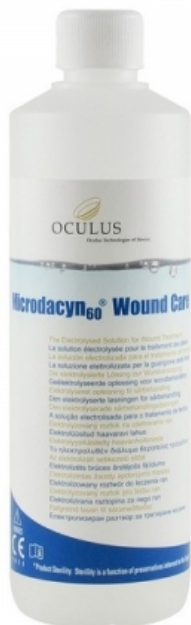

cena: 56,08 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	skóra
Działanie	dezynfekujące, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe
Opakowanie	500 ml
Postać	roztwór
Producent	KIKGEL MIROŚŁAW KIK
Sposób aplikacji	na skórę
Typ produktu	Wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.
Wskazania	odleżyny, oparzenie, owrzodzenia, rana

Opis produktu

Opis:
Microdacyn 60 Wound Care, roztwór do leczenia ran o szerokim działaniu przeciwdrobnoustrojowym może być stosowany do przepłukiwania ucha zewnętrznego, spojówki oka, jamy ustnej i tkanek takich jak więzadła i ścięgna.

Skład:
40 ppm (0,004%) podchlorynu sodu, 40 ppm (0,004%) kwas podchlorawy, woda oczyszczona

Działanie:
ma właściwości przeciwzapalne,
nie wymaga wyłukiwania z ran głębokich,
bezpieczny dla zdrowych komórek,
nie powoduje uodpornienia bakterii,
obojętny odczyn pH,
niweluje nieprzyjemny zapach ran,
dopuszczony do stosowania w terapii podciśnieniowej NPWT.

Wskazania:
Microdacyn 60 Wound Care, roztwór jest przeznaczony do płukania ran ostrych oraz przewlekłych takich jak:
odleżyny,
owrzodzenia,
rany w przebiegu stopy cukrzycowej,
rany pooperacyjne i oparzeniowe,
owrzodzenia nowotworowe.

Sposób użycia:

Nasączyć kompres gazowy roztworem Microdacyn i położyć bezpośrednio na ranę.

Zabieg powtarzać 2 razy dziennie przez 15 minut oraz podczas każdej zmiany opatrunku.

Microdacyn może być rutynowo stosowany zamiast soli fizjologicznej do przemywania ran pourazowych, ran oparzeniowych czy silnie zaleczyszczonych.

Nasączenie przyschniętego opatrunku preparatem ułatwia jego usunięcie.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

Stabilność i jałowość nieużytego roztworu są gwarantowane do 60 dni po otwarciu.

Uwagi:

Nie jest konieczne dodatkowe przemywanie rany przed zastosowaniem preparatu.

Nie jest konieczne wypłukiwanie preparatu z rany.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego:

* Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE.

* Posiada deklarację zgodności UE

* Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim

* Zawiera etykietę w języku polskim

Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.