

# PANI TERESA Opaska elastyczna stawu kolanowego, rozmiar L



cena: 21,76 pln

## Opis słownikowy

Cześć ciała	stawy
Działanie	przeciwbólowe, przeciwobrzękowe
Opakowanie	1 sztuka
Postać	opaska
Producent	SIGVARIS S.A.
Wskazania	ból, obrzęk, reumatyzm, stłuczenie, złamanie, zwichnięcie

## Opis produktu

### WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- w przewlekłych zmianach zwyrodnieniowo - reumatycznych stawu kolanowego
- po zdjęciu opatrunków gipsowych – wzmacnia i stabilizuje kolano
- przed i po operacjach uszkodzonych łąkotek
- w przypadkach zwichnięć lub obrażeń kolana
- zapobiega obrzękom, łagodzi bóle
- wspomaga aparat więzadłowy stawu przy wysiłku fizycznym

### Tabela rozmiarów

ROZMIAR - Obwód nogi nad kolaniem cm

S - 30 – 38

M - 39 – 47

L - 48 – 54

XL - 55 – 63

XXL - > 63

### Instrukcja używania:

#### Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu nogi nad kolaniem, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

#### Sposób zakładania:

Opaskę naciągnąć od dołu na wysokość stawu kolanowego.  
Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.



**Przechowywanie:**

W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

**Przepis prania:**

Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

**Uwagi:**

Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem.

W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni.

Nie jest wskazane stosowanie wyrobu przez całą dobę.

Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.

Nie stosować w przypadku niewłaściwego dobrania rozmiaru. Wyrób zbyt ciasny może pogorszyć krążenie krwi.