

PANI TERESA Opaska elastyczna stawu skokowego, taśma zapinana na rzep, rozmiar L



cena: 23,77 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	stawy
Działanie	przeciwbólowe, przeciwobrzękowe
Opakowanie	1 sztuka
Postać	opaska
Producent	SIGVARIS S.A.
Wskazania	ból, obrzęk, reumatyzm, stłuczenie, zwichnięcie

Opis produktu

WSKAZANIA / ZASTOSOWANIE:

- wzmacnia aparat więzadłowy stawu skokowego
- w przypadkach schorzeń reumatyczno-zwyrodnieniowych
- zabezpiecza po urazach
- chroni przed częstymi skręceniami stawu
- łagodzi bóle i obrzęki
- jako opatrunek po zdjęciu gipsu

Tabela rozmiarów

ROZMIAR - Obwód nogi nad kostką cm

S - 19 – 22

M - 23 – 25

L - 26 – 28

XL - > 28

Instrukcja używania:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu nogi nad kostką, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

Opaskę nałożyć na staw skokowy krzyżując taśmę na przegubie.
Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.

Przechowywanie:



W oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.

Przepis prania:

Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!

Uwagi:

Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem.

W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni.