

Prenalen Katar 20 ml



cena: 16,14 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	nos
Działanie	łagodzące, udrażniające nos, wspomagające
Opakowanie	20 ml (+ rozpylacz)
Postać	spray
Producent	POLSKI LEK
Sposób aplikacji	do nosa
Typ produktu	Wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.
Wskazania	katar

Opis produktu

Opis:

Wyrób Medyczny Prenalen Katar to izotoniczny roztwór soli morskiej z dodatkiem kwasu hialuronowego, D-pantenolu i olejków eterycznych, przeznaczony do terapii suchego nosa oraz nieżytów nosa.

Prenalen Katar jest dedykowany specjalnie dla kobiet w ciąży i matek karmiących. Może być stosowany u dzieci od 3 roku życia. Rozrzedza wydzielinę, łagodzi podrażnienia i ułatwia oddychanie.

Roztwór izotoniczny soli morskiej – oczyszcza i pielęgnuje błonę śluzową nosa, zapewnia jej odpowiednie nawilżenie.

Kwas hialuronowy – ma właściwości adhezyjne, przylega do błon śluzowych i wiąże wodę w komórkach nabłonka. Dzięki temu błony śluzowe nosa pozostają nawilżone, co ma istotne znaczenie zwłaszcza w okresie grzewczym i klimatyzowanych pomieszczeniach, gdy powietrze jest suche a pomieszczenia mniej wietrzane.

D-Pantenol – działa odżywczo na skórę, łagodzi podrażnienia związane ze stanem zapalnym i obrzękiem w przewodach nosowych, regeneruje błonę śluzową i podtrzymuje prawidłowy stan fizjologiczny.

Olejki eukaliptusowy i miętowy – działają łagodząco. Dodatkowo olejek eukaliptusowy ma działanie bakteriobójcze.

Składniki:

roztwór izotoniczny soli karnalitowej z morza martwego (odpowiednik 0,9% NaCl), glicerol, glikol propylenowy, D-Pantenol, hialuronian sodu, chlorowodorek benzalkonium, wersenian disodowy, olejek eukaliptusowy, olejek miętowy.

Sposób użycia:

U dzieci od 3-go roku życia: jedna doza do trzech razy dziennie.

Dorośli, kobiety w ciąży, matki karmiące: jedna do trzech doz, w miarę potrzeby, do 5 razy dziennie.

Przed zastosowaniem preparatu należy się zapoznać z treścią instrukcji użycia.

Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników preparatu.

Nie stosować łącznie z innymi preparatami podawanymi donosowo.
Po zabiegach chirurgicznych w obrębie nosa stosować preparaty po konsultacji z lekarzem.
Nie stosować po upływie terminu ważności.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego:

* Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE.

* Posiada deklarację zgodności UE

* Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim

* Zawiera etykietę w języku polskim

Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.