

Remo-Wax Spray 10 ml



cena: 21,41 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	uszy
Działanie	oczyszczające, wspomagające
Opakowanie	10 ml
Postać	spray do uszu
Producent	ORION PHARMA POLAND SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	do ucha
Typ produktu	Wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.
Wskazania	korek woskowinowy

Opis produktu

Opis:

Wyrób medyczny Remo-Wax® przeznaczony jest do higieny zewnętrznego kanału słuchowego. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia i woskowinę. Zawiera bezpieczne dla zdrowia nieinwazyjne składniki pochodzenia naturalnego, przygotowane według specjalnie dobranej formułacji.

Skład:

Krople: Alantoina, lanolina etoksylovana, polisorbát 80, polisorbát 60, sorbitol ciekły, syrop fruktozowy, eter polioksyetyleno-stearylowy, eter polioksyetyleno-oleilowy, olej lanolinowy, mirystynian izopropylu, olej z tłuszczu nerek, alkohol fenyloetylowy, alkohol cetylowy, butylowany hydroksytoluen, kwas sorbowy, chlorek benzetoniowy, woda.

Wskazania do stosowania:

Krople do usuwania woskowiny usznej Remo-Wax rozpuszczają korek woskowinowy i zapobiegają jego powstawaniu.

Sposób użycia:

Ogrzej zawartość butelki Remo-Wax do temperatury ciała (około 37 °C) przez zamknięcie butelki w dłoni na kilka minut.

Przechyl głowę w kierunku barku lub połóż się z głową zwróconą na bok i podaj do ucha od 10 do 20 kropli Remo-Wax. Pociągnij delikatnie płatek ucha w górę i w dół kilka razy, wykonując ruch obrotowy. Możesz wprowadzić do ucha mały tampon z bawełny zwilżony kilkoma kroplami Remo-Wax.

Pozostaw Remo-Wax w uchu przez 20 do 60 minut. W razie potrzeby można pozostawić roztwór w uchu na noc. Po użyciu kropli do usuwania woskowiny usznej Remo-Wax przewód słuchowy musi zostać przepłukany. W celu przepłukania uszu można użyć gruszki gumowej Remo-Wax lub udać się do lekarza lub pielęgniarki. Zaleca się by płukanie uszu u dzieci było wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę. Użyj gumowej gruszki do płukania ucha.

Jeśli nie udało się rozpuścić korka woskowinowego, podawanie kropli i płukanie uszu można powtarzać przez kolejne trzy dni. Stosując Remo-Wax regularnie raz w miesiącu można uniknąć ponownego powstania korka woskowinowego.

Uwaga! Przepłucz ucho po każdym zabiegu.

Nie należy stosować Remo-Wax w przypadku:

stanu zapalnego lub bólu ucha,
wydzieliny z ucha,
uszkodzonej, przedziurawionej lub przebitej błony bębenkowej (np. dren po nakłuciu błony bębenkowej),
uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników kropli Remo-Wax.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego:

- * Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE.
- * Posiada deklarację zgodności UE
- * Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- * Zawiera etykietę w języku polskim

Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.