

SILAURUM Silikonowy żel na blizny 15 ml

cena: 28,53 pln



Opis słownikowy

Cześć ciała	skóra
Działanie	nawilżające, przeciwświądowe, przeciwzapalne
Opakowanie	15 ml
Postać	żel
Producent	SOLINEA SP.Z O.O.,SP.KOM.
Sposób aplikacji	na skórę
Wskazania	blizny

Opis produktu

Silaurum silikonowy żel na blizny z nanokoloidek złota 15ml

Opis

Silaurum, silikonowy żel na blizny z nanokoloidek złota, 15 ml wyrób medyczny

Skład

Polisiloksany, cyklopentasiloksan, nanokoloidek złota, dwutlenek krzemu.

Działanie

Silaurum, silikonowy żel na blizny z nanokoloidek złota tworzy na skórze niewidoczny film, który chroni ją przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, zapewnia odpowiednie nawilżenie, tworzy mikrośrodowisko sprzyjające prawidłowemu i szybkiemu leczeniu blizny, nanokoloidek złota odpowiada za pobudzenie syntezy kolagenu, dodatkowo posiada właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne, uelastycznia, zmiększa i wygładza blizny, zmniejsza widoczność blizn, redukuje świąd, zaczerwienie i odbarwienia.

Wskazania

Silaurum, silikonowy żel na blizny z nanokoloidek złota przeznaczony jest do stosowania nowych i starych blizn różnego pochodzenia, np:
blizn pooperacyjnych,
blizn pourazowych,
blizn poparzeniowych,
blizn potrądzikowych.

Sposób użycia wyrobu medycznego

Niewielką ilość żelu nanieść na umytą i osuszoną powierzchnię blizny i delikatnie wmasować. Pozostawić do wyschnięcia.
W przypadku niecałkowitego wchłonięcia preparatu, nadmiar usunąć.
Preparat stosować 2 razy dziennie, minimum 2 miesiące.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie stosować na niezagojone rany i błony śluzowe, stosować wyłącznie na nieuszkodzoną skórę.
Nie stosować na nałożone wcześniej preparaty zawierające antybiotyki lub inne leki.
Unikać kontaktu z oczami.
Nie stosować po upływie terminu ważności.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry, zaczerwienienia lub wysypki przestać stosować.

Producent

Solinea
Koncertowa 7-277
Lublin