

Thealoz Duo Gel UD żel do oczu 30 minimsów

cena: 50,25 pln



Opis słownikowy

Cześć ciała	oczy
Działanie	łagodzące, nawilżające, ochronne, regenerujące
Opakowanie	30 minims. po 0,4 ml
Postać	żel
Producent	THEA POLSKA SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	do oczu
Typ produktu	Wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.
Wskazania	podrażnienie, suchość, zaczerwienienie

Opis produktu

Opis:

Thealoz Duo Gel to wyrób medyczny w formie płynnego żelu do stosowania bezpośrednio na powierzchnię oka. Wykazuje działanie nawilżające i wspierające regenerację. Główne substancje produktu są odpowiedzialne za uczucie nawilżenia. Trehaloza pomaga w regeneracji, zaś hialuronian i karbomer odpowiadają za szybką ulgę podrażnionych i zmęczonych oczu. Dzięki żelowej konsystencji, długo utrzymują się na powierzchni oka, zapewniając tym samym ochronę i komfort.

Skład:

Trehaloza, hialuronian sodu, karbomer, sorbitol, wodorotlenek sodu, woda do wstrzykiwań.

Sposób użycia:

Dorośli: 1 kroplę preparatu należy wkraplać do każdego oka od 1 do 4 razy dziennie. Ze względu na żelową konsystencję wyrobu, osoby noszące szkła kontaktowe przed zastosowaniem produktu powinny je zdjąć. Po użyciu, należy odczekać co najmniej 30 minut przed ponownym założeniem soczewek.

Stosowanie produktu

Przed zastosowaniem wyrobu należy dokładnie umyć ręce.
Oderwać jeden z pojemników umieszczonych na taśmie.
Obrócić oderwany pojemnik do góry nogami i postukać w niego.
Ruchem obrotowym, trzymając za końcówkę pojemnika, otworzyć go.
Wprowadzić do worków spojówkowych po jednej kropli preparatu.
Wyrzucić jednorazowe opakowanie po użyciu, nawet jeśli znajdują się w nim resztki wyrobu.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, chroniąc od światła i wilgoci, w sposób niedostępny dla dzieci.
Nie wstrzykiwać, nie połykać.
Nie stosować jeśli pojemnik jest uszkodzony.

Produkt nie zawiera konserwantów ani fosforanów.

Stosowanie wyrobu z innymi lekami:

Odczekać co najmniej 15 minut pomiędzy zastosowaniem innych produktów do oczu.
Preparat Thealoz Duo Gel stosować jako ostatni.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego:

- * Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE.
- * Posiada deklarację zgodności UE
- * Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- * Zawiera etykietę w języku polskim

Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.