

URGO Oparzenia i rany powierzchniowe - wodoodrny 10x7 cm, 4 sztuki



cena: 27,60 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	skóra
Działanie	gojące, wspomagające
Opakowanie	4 szt.
Postać	plaster
Producent	URGO SP.Z O.O.
Sposób aplikacji	na skórę
Typ produktu	Wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.
Wskazania	oparzenie, rana

Opis produktu

Opis:

URGO Plastry na Oparzenia z technologią lipido-koloidalna o skuteczności potwierdzonej w badaniach. Leczą oparzenia I i II stopnia powierzchniowe Szybko uśmierzają ból Przyspieszają gojenie Umożliwiają bezbolesne usunięcie opatrunku Opatrunek wodoodporny, może być stosowany podczas kąpieli pod prysznicem

URGO plastry na oparzenia z unikalną technologią lipidokoloidalną – nie przywierają, przepuszczają powietrze. Dzięki warstwie ochronnej zbudowanej z poliestru i siateczce w technologii lipidokoloidalnej połączonej z elementami hydrokoloidowymi oraz wazeliną uśmierza ból i sprzyja gojeniu. Ponadto plaster nie przykleja się do rany i można go bezboleśnie zdjąć.

Stosowanie:

W przypadku wszystkich oparzeń: Oczyszczyć ranę środkiem antyseptycznym bez alkoholu. Opłucz wodą lub roztworem soli fizjologicznej URGO. plaster Ostrożnie osusz ranę sterylnym gazikiem. W przypadku oparzenia nigdy nie stosuj środków antyseptycznych zawierających eozynę. plaster Zdjąć warstwę ochronną z plastra. Nałożyć na obszar przeznaczony do leczenia - o ile to możliwe, nie ruszać pęcherza, ponieważ chroni przed zakażeniem. Jeżeli pęcherz jest pęknięty, odkaż obszar. Nie usuwaj martwej skóry, jeżeli sama nie odpada. obgryzanie Stosuj od 5 do 6 dni, przy czym opatrunek należy zmienić po raz pierwszy po ich 24 godzinach, a następnie zmieniaj co 48 godzin.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego:

- * Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE.
- * Posiada deklarację zgodności UE
- * Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- * Zawiera etykietę w języku polskim

Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.