

## Zaspray 10 ml



cena: 43,66 pln

### Opis słownikowy

Cześć ciała	powieki
Działanie	łagodzące, nawilżające, odświeżające, wspomagające
Opakowanie	10 ml
Postać	spray
Producent	THEA POLSKA SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	na skórę
Typ produktu	Wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.
Wskazania	alergia, podrażnienie, suchość

### Opis produktu

#### Opis:

Zaspray to wyrób medyczny w postaci roztworu o nawilżającym i łagodzącym działaniu, który przeznaczony jest do stosowania na powieki. Przynosi ulgę w przypadku swędzenia i suchości oczu. Produkt szczególnie polecany osobom, które nie lubią korzystać lub mają trudności ze stosowaniem klasycznych, nawilżających kropli do oczu.

Nie zawiera konserwantów.

Stosowanie wyrobu medyczny Zaspray pozwala łagodzić swędzenie, suchość, podrażnienie i zaczerwienienie oczu. Ponadto, pozostawia uczucie świeżości i ochłody. Zapobiega utracie nawilżenia, ograniczając parowanie wody z powierzchni gałki ocznej. Preparat pomaga przywrócić naturalną równowagę i ustabilizowanie filmu łzowego, który może być zaburzony przez stres środowiskowy (będący wynikiem alergenów, klimatyzacji, wiatru, kurzu, zanieczyszczeń, długotrwałego noszenia szkieł kontaktowych, pracy przed monitorem komputerowym czy złym oświetleniem).

#### Skład:

Kompleks Per-Lip (liposom 4%, ekstrakt z nasion perilli 0,5%), hialuronian sodu, kwas borowy, tetraboran sodu dziesięciowodny, PEG 300, wersenian disodu dwuwodny, chlorek sodu, woda.

#### Sposób użycia:

Przed zastosowaniem wyrobu należy dokładnie umyć dłonie.

Zdjąć soczewki kontaktowe, o ile są noszone.

Trzymać butelkę w odległości około 10 cm od oka uważając by nie zatkać palcem otworu w dyszy.

Stosować na zamkniętej powiece.

W razie potrzeby czynność powtórzyć na drugim oku.

#### Stosowanie produktu

Aplikować 1-2 rozpylenia, 3-4 razy dziennie na zamknięte powieki przez okres 3-4 kolejnych dni.

Nie stosować dłużej niż przez 30 dni w sposób ciągły.

**Przeciwwskazania i środki ostrożności:**

Preparat wielokrotnego użytku przeznaczony do stosowania przez jednego pacjenta. Aby przeciwdziałać zanieczyszczeniu krzyżowemu należy chronić butelkę przed stosowaniem przez osoby trzecie.

Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.

Nie dotykać dyszą do powierzchni oka ani innych przedmiotów.

Wyrób do stosowania zewnętrznego. Nie wstrzykiwać ani nie stosować doustnie.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego:

\* Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE.

\* Posiada deklarację zgodności UE

\* Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim

\* Zawiera etykietę w języku polskim

Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.